


同梱物・検査内容チェックシート

こちらは「ウイルス検査キット」の同梱物、採取方法の確認用チェックシートになります。ご自身で採取をされる際にお使いください。尚、このシートは検査キットと一緒に郵送いただく必要はございません。
万が一同梱物に不備等がございましたら、0120-33-4747 までお問い合わせください。

■ 同梱物チェック

同梱物は全て揃っていますか？

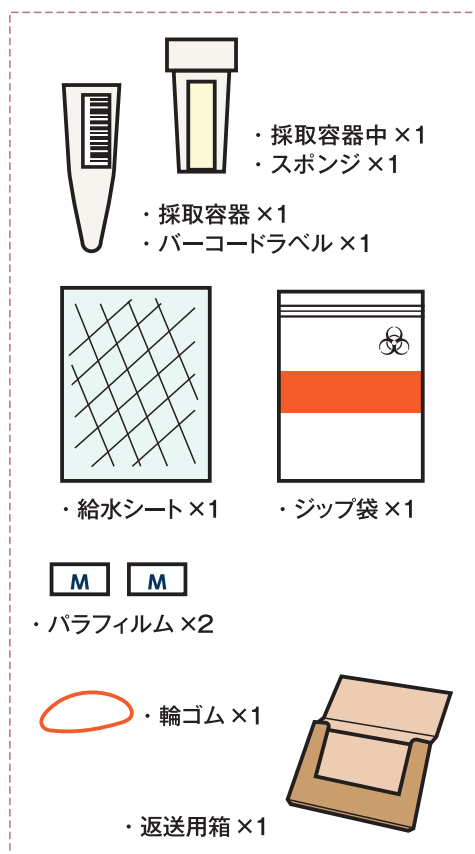

| 同梱物 | 個数 | チェック欄 |
|----------------|----|-------|
| 採取容器外 (バーコード付) | ×1 | |
| 採取容器中 (スポンジ入) | ×1 | |
| 給水シート | ×1 | |
| パラフィルム | ×2 | |
| ジップ袋 | ×1 | |
| 輪ゴム | ×1 | |
| 返送用箱 | ×1 | |

■ 検査内容チェック

検査内容は問題なく進められましたか？

| 検査内容確認 | チェック欄 |
|----------------------------|-------|
| 手を洗いましたか？ | |
| 食後、うがい後から 30分経っていますか？ | |
| スポンジを 2分間、唾液に浸しましたか？ | |
| 容器の蓋をしっかり締め、パラフィルムを巻きましたか？ | |
| 給水シートで採取容器をくるみましたか？ | |
| ジップ袋のジップはきちんと閉じましたか？ | |
| 記入した同意書は同梱しましたか？ | |