


同梱物・検査内容チェックシート

こちらは「ウイルス検査キット」の同梱物、採取方法の確認用チェックシートになります。ご自身で採取をされる際にお使いください。尚、このシートは検査キットと一緒に郵送いただく必要はございません。
万が一同梱物に不備等がございましたら、0120-33-4747 までお問い合わせください。

■ 同梱物チェック

同梱物は全て揃っていますか？

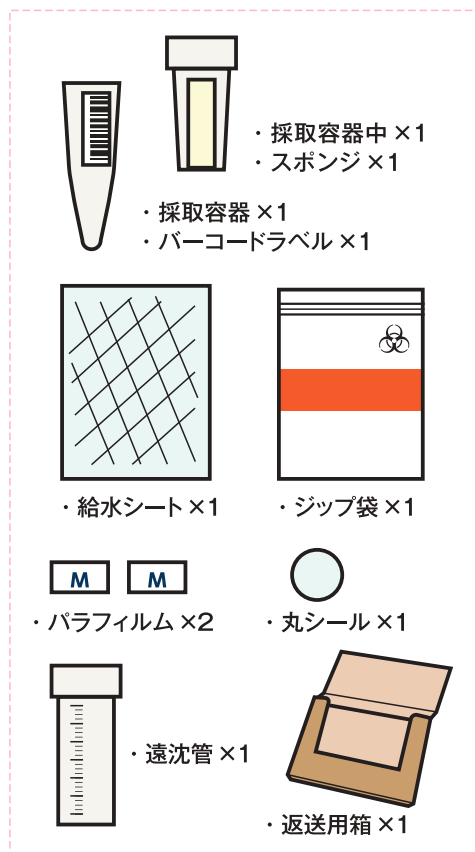

同梱物	個数	チェック欄
採取容器外 (バーコード付)	×1	
採取容器中 (スポンジ入)	×1	
給水シート	×1	
パラフィルム	×2	
ジップ袋	×1	
丸シール	×1	
遠沈管	×1	
返送用箱	×1	

■ 検査内容チェック

検査内容は問題なく進められましたか？

検査内容確認	チェック欄
手を洗いましたか？	
食後、うがい後から 30分経っていますか？	
スポンジを 2分間、唾液に浸しましたか？	
容器の蓋をしっかり締め、パラフィルムを巻きましたか？	
給水シートで採取容器をくるみましたか？	
ジップ袋のジップはきちんと閉じましたか？	
記入した同意書は同梱しましたか？	